

ارشادات لاستعمال المستحضر سيلياكس

قبل أخذ العينة يجب الامتناع عن الأكل, الشرب, التدخين, وإدخال اي شيء للفم لمدة 45 دقيقة.



- قبل الاستخدام، يرجى فحص المعلومات الظاهرة على اللاصقه وتطابقها مع بيانات المريض/ه .
- الصق اللاصقه على الأنبوه (بدون لاصقه لا نستطيع استكمال العملية).



- لا تلمس الاسفنجة ألموجوده على راس الشريحة.
- لا تغطس الاسفنجة في السائل الأزرق قبل الانتهاء من الاختبار.



يجب اشباع الاسفنجة ألموجوده على راس الشريحة بلعاب المريض، وفرك اللثة على جانبي الخد على الأقل عشر مرات على كل جانب.



يجب فصل الشريحة مع الاسفنجة ألموجوده على راسها من الأنبوه، أدخلها في الأنبوه مع السائل واغلاقها بإحكام (انظر الصورة المرفقة).





يجب خلط محتويات الأنبوبه بلطف 15 مرات عن طريق هز أنبوب الاختبار.

- يجب حفظ المستحضر في درجه حراره الغرفه. ممنوع تبريده.
- يجب إدخال الأنبوبه للظرف وإرسالها عن طريق البريد المسجل



TEL 077-5664353

ارشادات الاستعمال بالمستحضر سيلياكس

قبل أخذ العينة يجب الامتناع عن الأكل، الشرب، التدخين، وإدخال أى شيء للفم لمدة ساعة.



- قبل الاستخدام، يرجى فحص المعلومات الظاهره على اللاصقه وتطابقها مع بيانات المريض/ه .
- الصق اللاصقه د على الأنبوبه (بدون لاصقه لا نستطيع استكمال العملية).
- لا تلمس الاسفنجة الموجوده على راس الشريحة.
- يجب اشباع الاسفنجة الموجوده على راس الشريحة بلعاب المريض، وفرك اللثة على جانبي الخد على الأقل عشر مرات على كل جانب.
- يجب بري الاسفنجة الموجوده على راس الشريحة من الأنبوب، قلب الاسفنجة الموجوده على راس الشريحة الى أسفل، أدخلها في الأنبوب مع السائل واغلاقها بإحكام (انظر الصورة المرفقة).
- يجب خلط محتويات الأنبوبه بلطف 5 مرات عن طريق هز أنبوب الاختبار.
- يجب حفظ المستحضر في درجه حراره الغرفه. لا للحفظ بالتلاجه.
- يجب إدخال الأنبوبه للظرف وإرسالها عن طريق البريد

للاستفسار يمكن الاتصال بمختبر بورنطو على الرقم: 077-5664353