


**За 45 минут до взятия пробы необходимо воздержаться от приема пищи, воды и курения**



- Перед использованием проверьте информацию, представленную на этикетке, что она соответствует данным проверяемого
- Приклейте этикетку на пробирку (без наклейки не возможно будет завершить процесс).



- **Не прикасайтесь к губке на конце палочки**
- **Не окунайте палочку в синюю жидкость, не проведя нижеследующие действия**

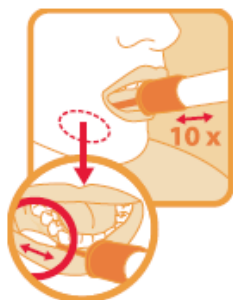

- Пациенту необходимо наслюнявить губку, и протереть десны с обеих сторон щеки, по крайней мере десять раз с каждой стороны.



- Необходимо привинтить палочку с губкой снаружи пробирки, перевернуть и вставить ее в пробирку с жидкостью и плотно закрыть (см фото прилагается).





- Осторожно смешать содержимое пробирки 15 раз встряхивая ее.

- Хранить пробирку при комнатной температуре. Не охлаждать.
- Необходимо отправить пробирку в приложенном конверте по почте заказным письмом



По вопросам обращаться в лабораторию Пронто по телефону 077-5664353